

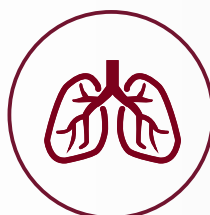


Zonas de Coagulação

Ablação por Micro-ondas

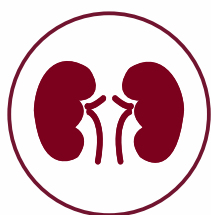

Renal e Pulmonar

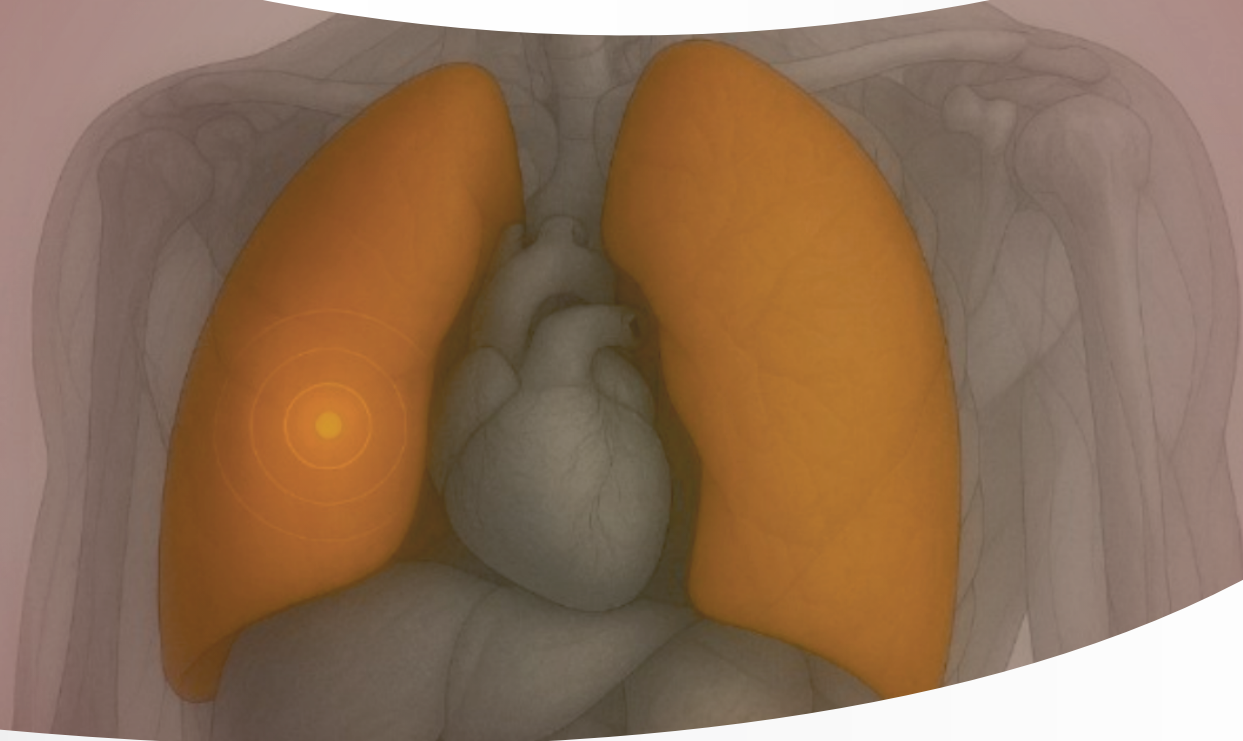

Precisão

•

Estabilidade

Eficiência


LineLife

Antena XphereTip®

Ø15G – Modo Contínuo

	Potência				
Tempo	Zona	50W	60W	70W	80W
3 min		2.2*2.1*0	2.3*2.2*0	2.4*2.5*0.1	2.8*2.7*0.2
5 min		2.4*2.4*0	2.5*2.5*0	3.0*3.0*0.1	3.4*3.5*0.3
8 min		2.5*2.5*0	2.8*2.8*0.1	3.4*3.5*0.2	3.7*3.8*0.4
10 min		2.9*2.9*0.2	3.0*3.0*0.3	3.8*3.9*0.4	3.9*4.0*0.5


Dimensão da Zona de Ablação:
A* B* M (em cm)

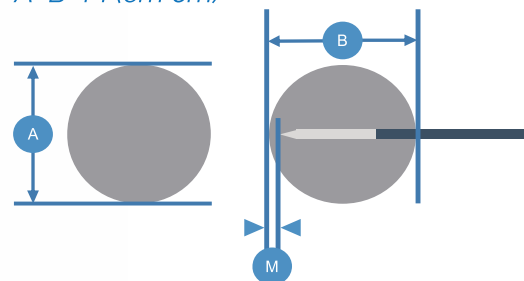

Antena SureTip®

Ø15G – Modo Contínuo

	Potência					
Tempo	Zona	40W	50W	60W	70W	80W
1 min		1.1*2.0*0	1.2*2.2*0	1.3*2.3*0	1.4*2.6*0.1	1.6*2.8*0.1
3 min		1.6*2.4*0.1	1.8*2.8*0.2	2.0*3.2*0.2	2.2*3.4*0.2	2.3*3.5*0.3
5 min		2.3*2.9*0.1	2.5*3.2*0.2	2.6*3.5*0.2	2.8*4.2*0.3	3.0*4.4*0.3
8 min		2.6*3.4*0.2	2.7*3.8*0.2	3.0*4.0*0.2	3.1*4.4*0.3	3.2*4.6*0.3
10 min		2.9*3.8*0.2	3.0*4.1*0.2	3.3*4.3*0.3	3.5*4.6*0.3	3.6*4.8*0.4

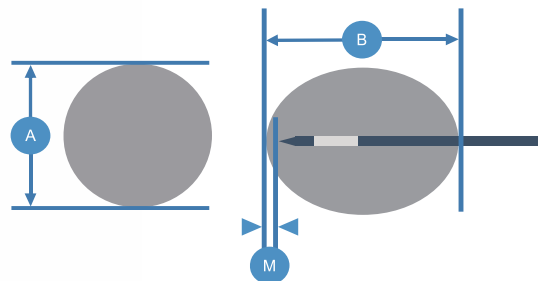

Ø16G – Modo Contínuo

	Potência					
Tempo	Zona	40W	50W	60W	70W	80W
1 min		1.0*2.0*0	1.2*2.2*0	1.3*2.3*0	1.4*2.5*0.1	1.6*2.7*0.2
3 min		1.7*2.4*0.1	2.0*2.8*0.1	2.1*3.1*0.1	2.3*3.2*0.2	2.4*3.4*0.3
5 min		2.1*2.8*0.1	2.3*3.2*0.2	2.4*3.5*0.2	2.7*3.7*0.3	2.8*4.0*0.3
8 min		2.4*3.3*0.2	2.5*3.7*0.2	2.6*3.9*0.2	2.8*4.1*0.3	3.0*4.3*0.3
10 min		2.6*3.5*0.2	2.9*3.9*0.2	3.1*4.2*0.3	3.3*4.4*0.3	3.4*4.6*0.4

Observações:

Todos os dados das dimensões da ablação são provenientes de testes laboratoriais realizados em rins de animais ex vivo a 26°C (temperatura ambiente). As dimensões da ablação podem ser diferentes em organismos in vivo, principalmente devido aos fortes efeitos de perfusão nos rins.
A = Largura da zona de ablação, perpendicular ao eixo da antena | B = Comprimento da zona de ablação, ao longo do eixo da antena | M = Distância da ponta da antena até a margem da zona de ablação no eixo da antena

Antena SureTip®

Ø16G – Modo Contínuo

Tempo	Potência	40W	60W	80W	100W
1 min	Zona	1.0*1.8*0	1.1*2.3*0.1	1.0*2.8*0.1	1.6*3.3*0.1
3 min		1.4*2.2*0	1.8*2.5*0.1	1.8*3.4*0.1	2.0*4.2*0.1
5 min		1.4*2.5*0.1	1.8*2.8*0.2	1.9*3.4*0.1	2.3*4.2*0.2
8 min		1.5*2.6*0.1	2.0*3.6*0.3	2.2*4.2*0.3	2.4*4.5*0.3
10 min		1.5*2.7*0.2	2.2*3.8*0.3	2.4*4.7*0.3	3.0*5.0*0.4
15 min		1.5*2.9*0.2	2.3*4.0*0.4	2.8*5.0*0.4	3.2*5.8*0.5


Ø18G – Modo Contínuo

Tempo	Potência	40W
1 min	Zona	0.7*2.0*0
2 min		0.8*2.4*0
3 min		0.9*2.7*0

Atenção:

1. Recomendamos a ablação com potência/tempo máximo de 40W/3 min
2. Recomendamos o uso de cânula coaxial com a antena de 18G para facilitar a operação.
3. A cânula coaxial deve ser posicionada fora da zona de ablação da antena.

Dimensão da Zona de Ablação:
A * B * M (em cm)

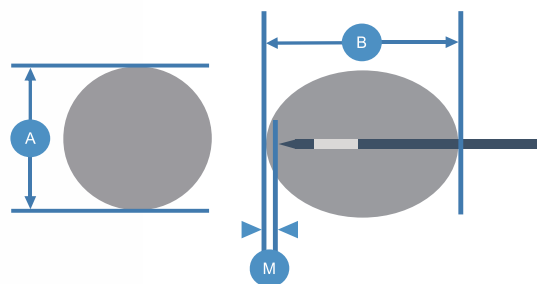

Observações:

Todos os dados das dimensões da ablação são provenientes de testes laboratoriais realizados em rins de animais ex vivo a 26°C (temperatura ambiente). As dimensões da ablação podem ser diferentes em organismos in vivo, principalmente devido aos fortes efeitos de perfusão nos rins.
A = Largura da zona de ablação, perpendicular ao eixo da antena | B = Comprimento da zona de ablação, ao longo do eixo da antena | M = Distância da ponta da antena até a margem da zona de ablação no eixo da antena


Especificações Técnicas

XphereTip®

REF.	Diâmetro	Ponta Ativa	Comprimento
KY-2450B-QT4	15 G	25 mm	100 mm
KY-2450B-QT5	15 G	25 mm	150 mm
KY-2450B-QT6	15 G	25 mm	200 mm
KY-2450B-QT7	15 G	25 mm	250 mm
KY-2450B-QT8	15 G	25 mm	300 mm

SureTip®

REF.	Diâmetro	Ponta Ativa	Comprimento
KY-2450B-T1	16 G	11 mm	100 mm
KY-2450B-T2	16 G	11 mm	150 mm
KY-2450B-T3	16 G	11 mm	200 mm
KY-2450B-T4	15 G	11 mm	100 mm
KY-2450B-T6	15 G	11 mm	150 mm
KY-2450B-T7	15 G	11 mm	200 mm
KY-2450B-T8	15 G	11 mm	180 mm
KY-2450B-T10	15 G	11 mm	250 mm
KY-2450B-T5	18 G	11 mm	150 mm
KY-2450B-T11	18 G	11 mm	100 mm
KY-2450B-T13	18 G	11 mm	200 mm

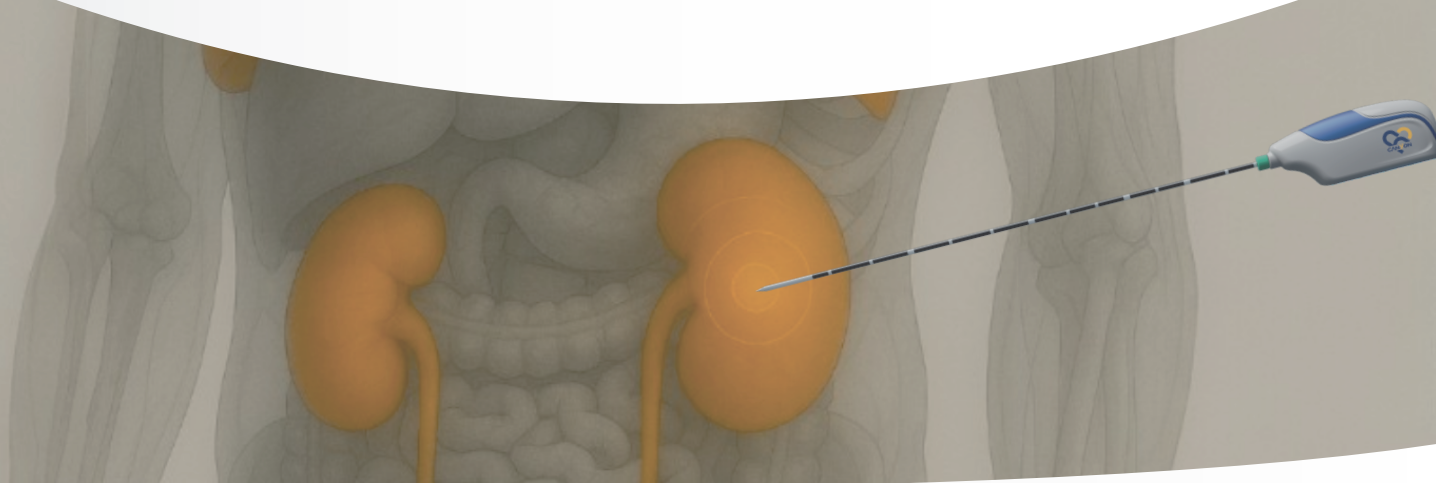

LINELIFE

Tecnologia a serviço da vida

*Importação exclusiva das mais avançadas tecnologias médicas, com entrega nacional
e impacto real na saúde do Brasil*




Al. dos Tupinás, 33 - Conj. 408 - Planalto Paulista - São Paulo/SP
www.linelifelife.com | ablacao@linelifelife.com | +55 11 3847-1100



Canyon Medical Inc.

Nanjing, Jiangsu – China | www.canyonmedical.com.cn

© 2024 Canyon Medical Inc. Todos os direitos reservados.06/2023 ENBR01 Ao

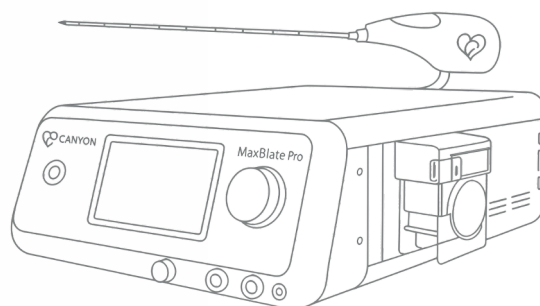

© 2025 Ali Health. Todos os direitos reservados.

Desenvolvimento, tradução técnica e adaptação por Larissa Âli – Ali Health: CNPJ 48.644.030/0001-67 | larissa_b_ali@icloud.com